

re|Fill

visage & cuir chevelu

voyez la différence

re|Fill




Lifting du visage - Découvrez votre nouvelle
identité

Confort, rapidité, sécurité

reFill permet un résultat homogène par injection automatique avec ses choix d'aiguilles.

Des ridules aux rides plus profondes, reFill répond à tous les besoins du médecin.

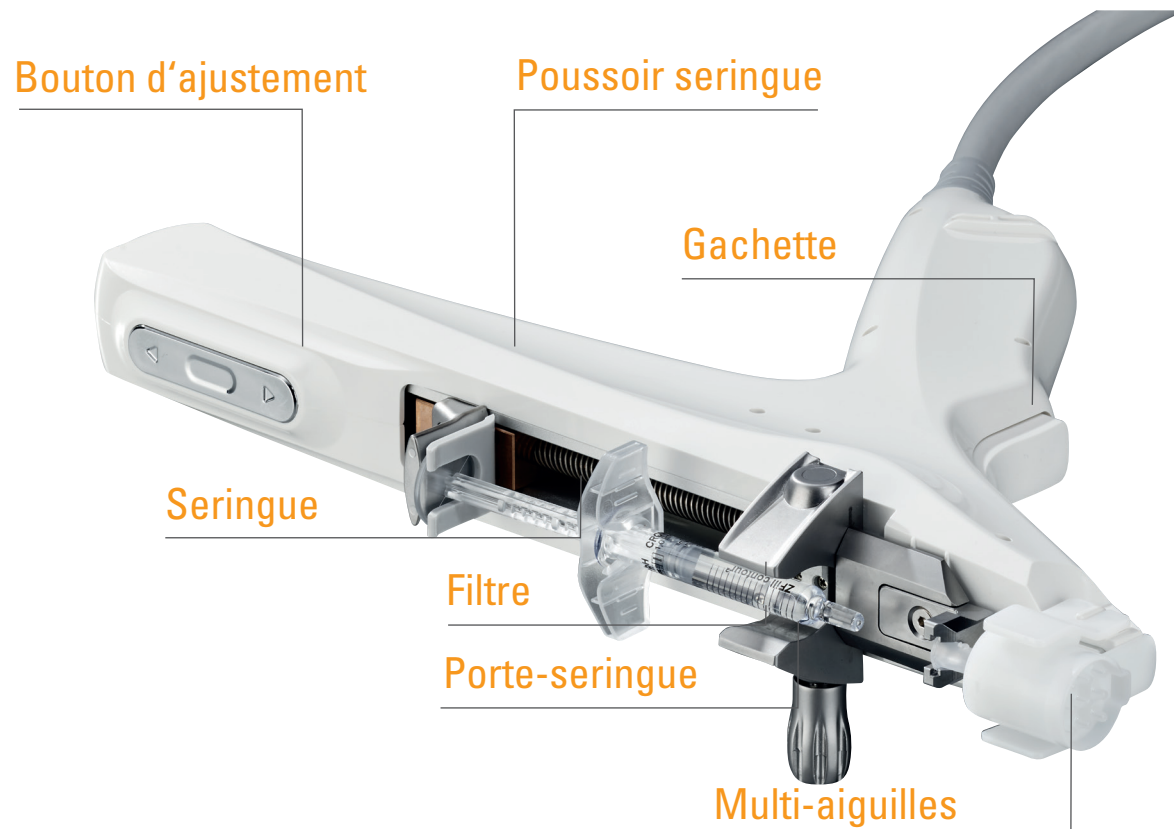

Le concept

Injection précise de la quantité de produit à la profondeur désirée grâce à l'automatisation et à l'aspiration disponible.

reFill est compatible avec presque tous les types de seringues et de produits à injecter.

INJECTION RAPIDE

Système d'injection automatique

1

RESULTAT UNIFORME

Profondeur de traitement assurée par l'aspiration

2

TRAITEMENT PRECIS

Embout aiguilles multiples

3

Combinaison
idéale

re | Fill

Flexibilité, précision, sécurité

Un large choix de paramètres possibles.

Sélection du niveau d'aspiration, du type de seringue, du dosage choisit, pour assurer un résultat homogène.

Les embouts à aiguilles multiples sont à usage unique.





Résultat homogène

La technologie combine à la fois
l'aspiration et l'injection automatique



Pièce à main amovible

Embout aiguille à usage unique



Interface utilisateur intuitive

- Choix de types de seringues
- Sélection du dosage à injecter

Cuir chevelu

Visage entier

Le dos des mains

Le cou

Décolleté

Dessus des genoux

Zones de traitement

un traitement - effets multiples



Interface utilisateur multifonctions


De nombreux paramètres, pour un traitement efficace

Ecran tactile LCD 7 pouces

Profondeur	Dosage	Viscosité	Aspiration	Mode HR (cheveux)
DEPTH (mm) 2.0	DOSE 10	VISCOSITY 3	VACUUM 4	MODE HR
Ajustement de la profondeur jusqu'à 5.0 mm par tranche de 0.2 mm	Ajustement précis de la quantité injectée	Ajustement précis en fonction de la viscosité du produit à injecter	Ajustement de l'aspiration en fonction de la zone à traiter	La fonction aspiration ne doit pas être utilisée pour un traitement du cuir chevelu



Mode de fonctionnement du reFill

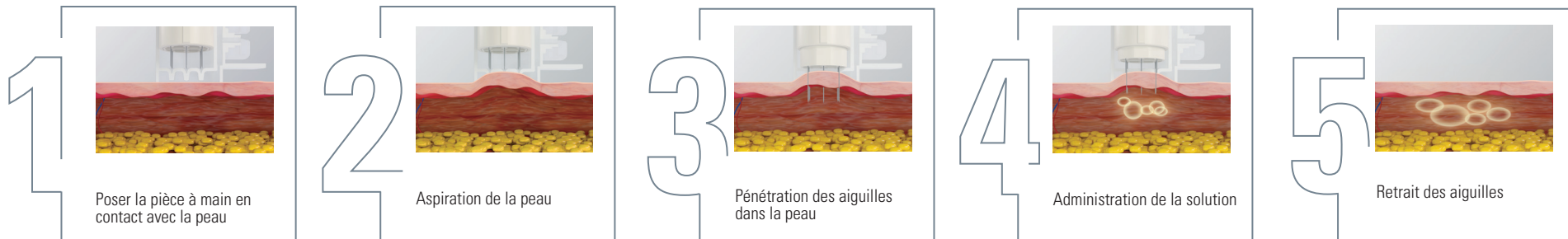

Caractéristiques techniques



**1, 2,
3, 5
CC**

Type de seringue

Embout aiguilles multiples Type d'aiguille

0.2 - 5.0 mm

Profondeur d'aiguilles

Aiguille 31G

Taille gauge

AC 110-240 V, 50/60 Hz

Puissance

29 | 39 L (cm)

4 | 23 P (cm)

18 | 13 H (cm)

Dimensions Injecteur | Corps

MD

0.9 | 4 kg

Poids Injecteur | Corps



Suivez-nous

Visitez notre site www.zimmer.de/en/

