

re|Build

Pour une peau parfaite

voyez la différence



La solution de traitement de la peau avec  
la Radio Fréquence Fractionnée Micro-  
aiguilles associé à la cryo anesthésiante

## Précise / Instantanée / Pratique

Traitement rapide avec confort du patient assuré, reBuild combine la RF Micro-aiguilles et le froid de contact pour protéger l'épiderme tout en ciblant le derme avec précision.



### Effet thermique par RF fractionnée

#### 1. Premier effet: Contraction immédiate du collagène

- Contraction du derme et réaction des fibres d'élastine
- Une fois que la chaleur est diffusée à une certaine température, les liaisons hydrogène de la molécule se rompent, ce qui induit un raffermissement immédiat des tissus
- On obtient une disposition plus stable des fibres de collagène qui ainsi se raccourcissent (tightening)

#### 2. Second effet: cicatrisation des plaies, remodelage du collagène, un raffermissement dans le temps

- Les fibroblastes chauffés peuvent stimuler la production de collagène
- Activité des fibroblastes et nouvelle production de collagène et d'élastine due au remodelage du derme
- Progression lente sur 3 à 6 mois

#### ACTION DES AIGUILLES

Processus de cicatrisation des plaies

1

#### EFFET THERMIQUE

Effet de régénération du collagène grâce à l'action thermique

2

#### DIFFUSION DE PRODUITS

Possibilité de diffusion de produits grâce aux aiguilles

3

3 technologies combinées

# Facile à utiliser

# re | Build



## Performance et Design

reBuild, l'appareil le plus compact de Micro-aiguilles fractionnées avec le froid de contact. Les micro-aiguilles et la technologie de froid (2 en 1), offrent des résultats visibles avec moins de sensations de douleur pendant le traitement, comparé aux autres systèmes sans le froid.

L'interface du reBuild est facile à utiliser, et tous les paramètres de réglages peuvent être ajustés. reBuild est compact et facile à manipuler !





## RF Micro-aiguilles Fractionnées

- Option embouts de 10 & 25 aiguilles
- Isolées & non-isolées
- Aspiration pour un traitement constant à la profondeur désirée (3 niveaux)
- Moteur pas à pas pour une précision de la pénétration des aiguilles
- Aiguilles stérilisées de diamètre 0.16 mm
- 10 niveaux de puissance de Radio-fréquence

## Système de froid de contact

- Capteur de température intégré
- Froid de contact jusqu'à à -10°C
- 3 niveaux de réglages



## Caractéristiques

- Traitement avec des aiguilles stérilisées jetables
- La technologie d'aspiration pour une application constante et plus sûre
- Pas besoin d'appliquer de la crème anesthésiante
- Traitement instantané avec le froid de contact



# Les effets


un traitement - de multiples effets

Cicatrice d'acné  
Réduction des rides / ridules  
Lentigos et tâches  
Lifting de la peau  
Effets raffermissant


# Micro-aiguilles, Aspiration & Froid

pour des traitements efficaces


Cicatrices d'acné,  
réduction des rides,  
lifting de la peau et  
effets raffermissant

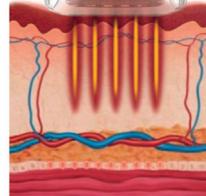


Les tissus sont stimulés par les aiguilles. L'énergie délivrée par la RF à une profondeur souhaitée.

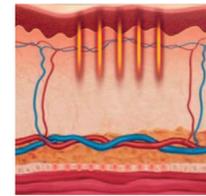


Début de la cicatrisation des plaies, induction de la régénération et de la prolifération des fibroblastes.

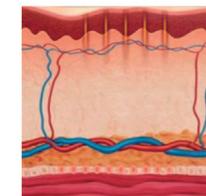


Période de régénération de la cicatrisation des plaies - environ 3 semaines pour le collagène et la synthèse de l'élastine.

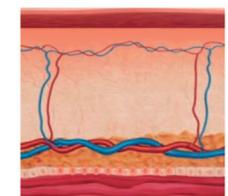


Remodelage du collagène.

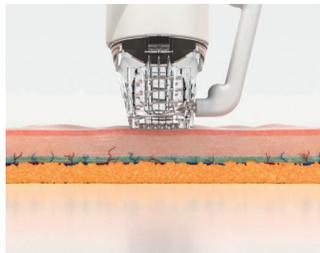


1. Contact de l'embout avec la peau

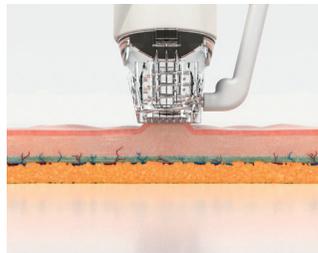

2. Aspiration activée

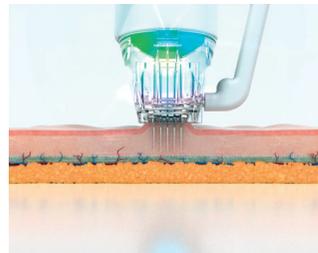


3. Pénétration des aiguilles

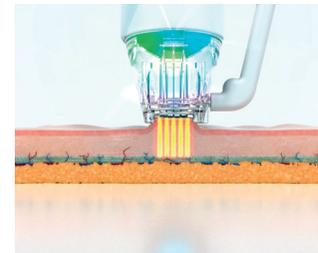


4. Production d'énergie de la RF

Action de l'aiguille RF

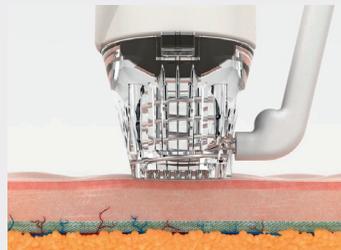

Technologie d'aspiration

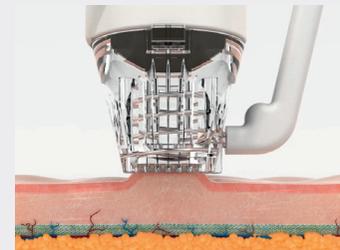

Technologie unique d'aspiration

- L'aiguille reste toujours à une profondeur constante
- Permet de mieux cibler la zone et la profondeur
- Permet un traitement autour des yeux et de la zone mandibulaire plus facile



# Caractéristique techniques

**36,8** L

**46,1** P

**25,5** H

Dimensions (cm)

**RF Fractionnée & Cryo**

Type d'énergie

**Pièce à main RF micro-aiguilles,  
pièce à main Cryo**

Pièces à main

**AC 110-240 V, 50/60 Hz**

Puissance

**10 aiguilles**

**25 aiguilles**

(isolées, non-isolées)

Cartouche (Tip)

**MD**

**10**

kg  
Poids



Suivez-nous

Zimmer MedizinSysteme GmbH  
Junkersstraße 9  
89231 Neu-Ulm, Germany  
Tel. +49 7 31. 97 61-291  
Fax +49 7 31. 97 61-299  
export@zimmer.de  
www.zimmer-aesthetics.de

Visitez notre site [www.zimmer.de/en/](http://www.zimmer.de/en/)

